Lösungsansätze für häufig auftretende Supportfälle

Scanner bzw. Lizenz wird nicht gefunden:

▶ Erscheint beim Start der BodyLux® Software die Meldung "1 Scanner gefunden"?

- → Nein? Stromanschluss und richtigen Sitz des Gerätesteckers prüfen.
- ➔ Geräteschalter am Gerätewagen auf "1" stellen.
- ▶ Im Studio3D-Fenster werden gelbe Dreiecke mit Ausrufezeichen angezeigt die Lizenz wurde nicht gefunden.
 - → Steckt der Lizenz-Dongle richtig am Computer? Einmal abziehen und wieder anstecken.
 - → Überprüfung auf evtl. Befristung der Lizenz in den Einstellungen unter dem Reiter "Plugin"

Drehplatte dreht nicht:

Standard Drehplatte	Bluetooth Drehplatte
 Ist der Notausschalter am Scanner gedrückt? Ja? Schalter herausziehen bzw. durch leichte Drehbewegung lösen. 	 Ist der Notausschalter an der Drehplatte gedrückt? Ja? Schalter herausziehen bzw. durch leichte Drehbewegung lösen.
 Steckt das Drehplattenkabel an Drehplatte und Scanner richtig? Zur Prüfung Kabel an beiden Stellen trennen und neu anstecken. 	 Ist die Drehplatte angeschlossen? Stromanschluss pr
 Fehlerhafte Kabelverbindung zwischen Drehplatte und Scanner? Drehplatte direkt an das kurze Kabelende am Scanner anschließen – dreht die Drehplatte, ist das lange Verbindungskabel defekt. 	 Drehplatte wurde als Bluetooth-Gerät in Windows abgemeldet. Drehplatte erneut anmelden – Support anrufen.

Fehlermeldung "Scanabbruch Schritt x/7" während Scan- oder Berechnungsvorgang:

Fremdkörper vor Kamera oder Projektor?

- → Projektor oder Kamera dürfen nicht durch herabhängende Dinge (Kabel, Maßband, etc.) verdeckt werden
- Bewegung der auf der Drehplatte befindlichen Person?
 - → Die zu scannende Person darf sich nicht bewegen.
- Falsche Kleidung der zu scannenden Person?
 - → Die zu scannende Person muss Unterwäsche (enganliegend/nicht zu dunkel) tragen.
 - → Die zu scannende Person sollte barfuß gescannt werden, keine Socken oder Strümpfe.
- Im Scan-Bild ist etwas anderes als die zu scannende Person zu sehen?
 - → Scanner und Drehplatte so aufstellen, dass keine Wände oder andere Gegenstände mit gescannt werden.
- Scanabbruch auf Grund zu heller Scanumgebung?
 - → Vermeiden von zu starker Lichteinstrahlung auf der Drehplatte.
 - → Scannen ohne Zimmerbeleuchtung bzw. bei abgedunkeltem Fenster.

Allgemeine Hinweise:

- Laufende Windows-Updates können sämtliche Funktionen der BodyLux® Software zeitweise behindern. Bei Problemen bitte prüfen ob aktuell Updates installiert werden, diesen Vorgang beenden lassen und danach das BodyLux® System neu starten.
- ▶ Bei Fragen zu Funktionen der BodyLux[®] Software bitte in der Gebrauchsanweisung nachlesen.

Rev.-Nr.: Z-23-08-383



